


【FPD-8010E 安装步骤】


- 1、更新模块是一个可执行文件。用鼠标双击以下图标以执行。



- 2、点击“是/Yes”按钮以更新程序。

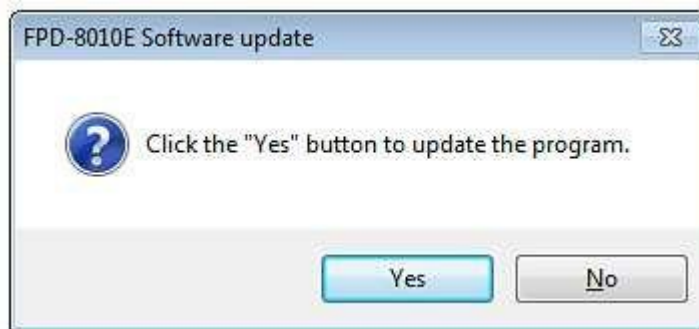

- 3、更新文件解压过程中，将显示以下对话框：

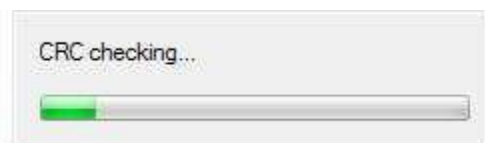


- 4、解压程序完成后，会显示以下更新对话框。点击“执行/Execute”按钮以更新程序。



5、如果检测到已安装的FPD8010旧文件，会显示以下对话框。

点击“是/Yes”按钮。

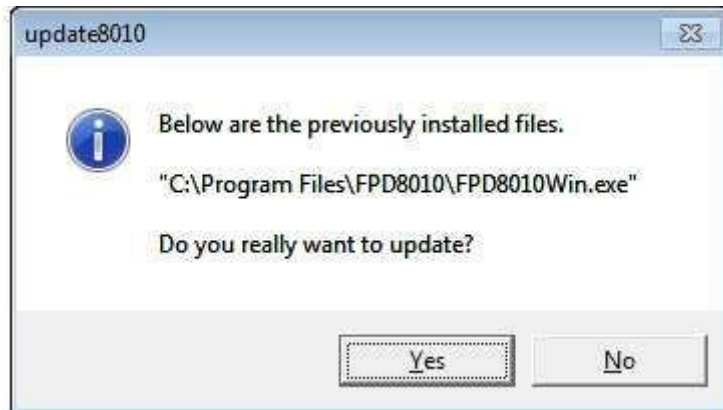

6、更新完成后，会显示以下对话框。

点击“OK”按钮以完成更新。旧文件将被删除。



7、确认更新是否正确完成。启动应用程序后确认版本信息。

